



VIDA TEST 検査方法



①キットの中身を確認ください




②アルコールパットを出す



③人差し指を良く拭いてください



④血液が出てきたら一回拭いてください

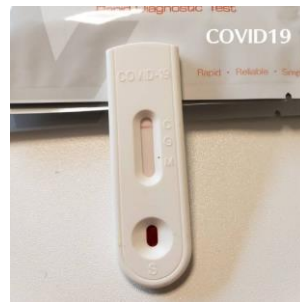


⑤指先を軽く絞り、血液がでたらスポイトで2滴ほど吸ってください。その際スポイトの奥まで血液を入れなくて、細い先のためてください。

⑥本体に血液をすべて入れてください

⑦検査液を血液と同じ量入れてください

⑧数十秒で検査結果がでます上記表示は陰性です。

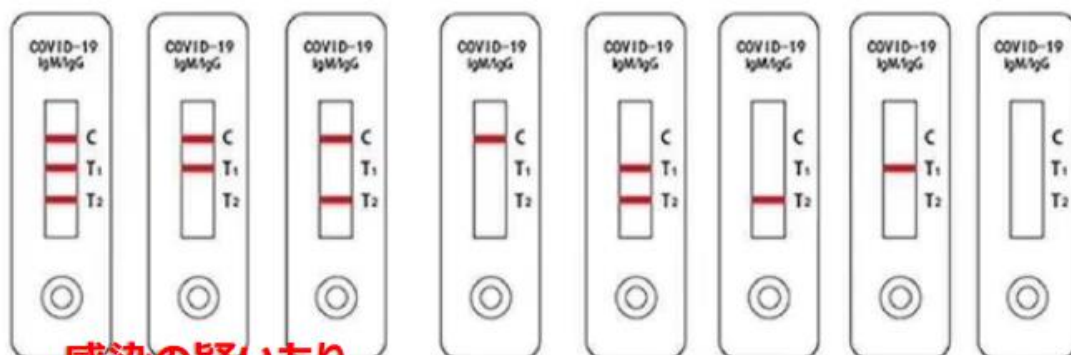

感染の疑いあり

T1 陽性	T1 陽性	T1 陰性	T1 陰性	判定不可能	判定不可能	判定不可能	判定不可能
T2 陽性	T2 陰性	T2 陽性	T2 陰性				
・感染初期	・感染中期	・免疫、抗体あり					